

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DÂY CÁP NỐI DỪNG CHO KIM ĐIỆN CƠ ĐỒNG TÂM/ĐỒNG TRỤC

Mô tả thiết bị

Dây cáp dùng cho kim điện cực đồng tâm bao gồm dây dẫn có vỏ bọc, đầu nối có vỏ bọc và đầu nối 5 pin có vỏ bọc.

Mục đích sử dụng

Dây cáp được sử dụng để kết nối kim điện cơ đồng tâm với thiết bị tương ứng để thu thập và truyền tín hiệu điện sinh học của cơ thể.

Chỉ định

Dây cáp dùng cho kim điện cơ đồng tâm là dây kết nối giữa hệ thống theo dõi EMG và kim điện cơ đồng tâm dùng một lần.

Chống chỉ định

- Bệnh nhân bị dị ứng với thiết bị này.
- Bệnh nhân bị loét da hoặc bệnh nhân đeo máy tạo nhịp tim.

Cảnh báo

- Sau khi kết nối với các điện cực theo hướng dẫn, hãy kiểm tra xem dây có dẫn điện không. Ngừng sử dụng và thay thế nếu không dẫn điện.
- Không được tái sử dụng.
- Vui lòng kiểm tra xem bao bì có bị hỏng không và sản phẩm có còn trong thời hạn sử dụng không trước khi sử dụng.
- Không kết nối trực tiếp dây cáp với nguồn điện xoay chiều.
- Ngừng sử dụng và thay thế dây cáp nếu có tiếng ồn lớn.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Kết nối dây cáp với kim điện cực đồng tâm tương ứng, sau đó kết nối đầu còn lại của dây cáp với hệ thống theo dõi EMG tương ứng.

Bước 2: Khi kết thúc chẩn đoán, loại bỏ thiết bị ra khỏi người bệnh nhân.